




For ikke-småcellet lungecancer

Brugervejledning

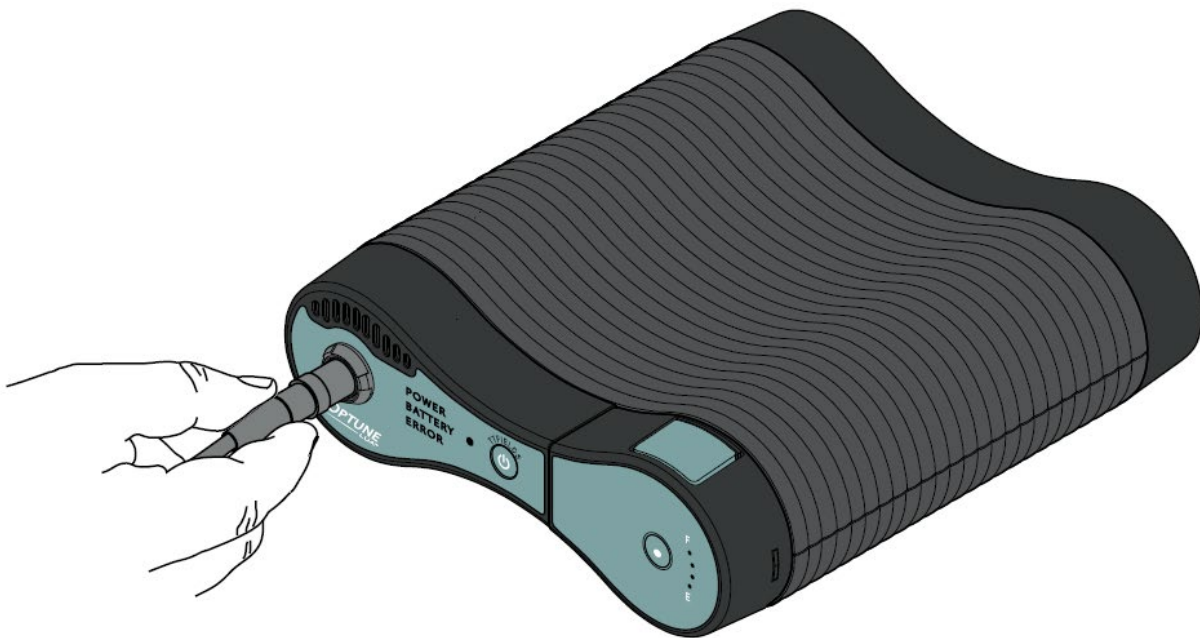

Modelnummer: TFT9200

Ref nummer :TFT9201EU

Indhold

1.	VEDR. OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS	4
1.1.	BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN	4
1.2.	ERKLÆRET FORMÅL	4
1.3.	KONTRAINDIKATIONER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER	4
2.	KLINISKE FORDELE OG KLINISK DOKUMENTATION	9
3.	HVILKE RISICI ER DER VED AT BRUGE OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS?	10
4.	VIRKNINGSMEKANISME OG YDEEVNE	10
5.	OVERSIGT OVER OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS....	11
6.	SYMBOLFORKLARING	13
7.	FØR DU STARTER	17
8.	BRUGERVEJLEDNING	18
8.1.	UDTAGNING AF TRANSDUCER-ARRAYS FRA EMBALLAGEN	18
8.2.	FORBEREDELSE AF HUDEN FOR PLACERING AF TRANSDUCER-ARRAY	19
8.3.	PLACERING AF TRANSDUCER-ARRAYS.....	20
8.4.	TILSLUTNING AF ILE TRANSDUCER ARRAYS TIL OPTUNE LUA-UDSTYRET	21
8.5.	TILSLUTNINGSKABEL.....	22
8.6.	START OG STOP AF UDSTYRET.....	23
8.7.	INDSÆTNING OG UDTAGNING AF BATTERIET.....	27
8.8.	OPLADNING AF BATTERIET	29
8.9.	BRUG AF INDSÆTTELIG STRØMFORSYNING.....	32
8.10.	AFBRYDELSE FRA UDSTYRET	33
8.11.	TRANSPORT AF UDSTYRET.....	35
9.	OMGIVELSESBETINGELSER FOR NORMAL DRIFT, OPBEVARING OG TRANSPORT.....	36
10.	FORVENTET HOLDBARHED	37
11.	BORTSKAFFELSE	37
12.	FEJLFINDING	38
13.	ASSISTANCE OG INFORMATION	41
14.	ORDLISTE	42
15.	GÆLDENDE STANDARDER	43
16.	INDGANGS- OG UDGANGS-SPECIFIKATIONER.....	44
17.	UDSENDT STRÅLING OG ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET	45

Denne vejledning er beregnet til patienter, der modtager TTFields-behandling ved hjælp af et Optune Lua behandlingssæt og ILE Transducer Arrays.

1. VEDR. OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS

1.1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

Optune Lua behandlingssættet er et transportabelt udstyr. Den producerer elektriske felter, såkaldte tumorbehandlingsfelter ("TTFields"). ILE Transducer Arrays tilsluttet til udstyret leverer TTFields til brystkassen. TTFields er beregnet til at destruere lungecancerceller.

Udstyret er beregnet til hjemmebehandling i et gennemsnit på mindst 12 timer dagligt. Optune Lua behandlingssæt refererer til elektrisk feltgenerator (Optune Lua, udstyret), tilslutningskabel, strømforsyning, batteri, batterioplader og ILE Transducer Arrays.

1.2. ERKLÆRET FORMÅL

Optune Lua behandlingssæt er indikeret for behandling af stadie IV, ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer, i kombination med Pemetrexed (Alimta), efter mislykkede første-linje behandlinger.

Behandlingen er beregnet til voksne patienter, 18 år eller ældre, og bør påbegyndes mere end fire uger efter seneste kirurgi, stråleterapi eller kemoterapi.

Udstyret er beregnet til hjemmebehandling i mindst 12 timer dagligt og bør anvendes indtil progression i brystkasse eller øvre abdomen.

1.3. KONTRAINDIKATIONER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER

Kontraindikationer

Anvend ikke Optune Lua behandlingssæt hvis du har et aktivt implanteret medicinsk udstyr. Eksempler på aktive, elektroniske anordninger omfatter hjernestimulatorer, rygmarsstimulatorer, vagusnervestimulatorer, pacemakere og defibrillatorer. Anvendelse af Optune Lua behandlingssættet sammen med implanterede, elektroniske anordninger er ikke blevet testet, og kan muligvis føre til fejlfunktion i den implanterede anordning.

Anvend ikke Optune Lua behandlingssættet, hvis det er kendt, at du er følsom over for ledende hydrogeler, som f.eks. den gel, der anvendes på elektrokardiogram-klæbebepuder

(EKG) eller elektroder til transkutan elektrisk nervestimulering (TENS). Hvis dette er tilfældet, kan hudkontakt med gelen, der anvendes med Optune Lua behandlingssættet, ofte forårsage rødme og kløen, og kan i sjældne tilfælde endda føre til alvorlige, allergiske reaktioner såsom chok og åndedrætsbesvær.

Anvend ikke Optune Lua behandlingssæt hvis du har en klinisk signifikant hepatisk eller renal sygdom.

Anvend ikke Optune Lua behandlingssættet, hvis du lider af en anden signifikant neurologisk sygdom (primære anfald, demens, progressiv degenerativ neurologisk sygdom, meningitis eller hjernebetændelse, hydrocephalus i forbindelse med forhøjet intrakranielt tryk).

Anvend ikke Optune Lua behandlingssæt hvis du har en af de følgende tilstande: Kongestiv hjerteinsufficiens, angina pectoris der ikke er medicinsk kontrolleret, historik for myocardial infarkt 1 år fra start af behandling med udstyret, ukontrolleret hypertension eller hjerterytmier, aktiv infektion der kræver i.v. antibiotika, ustabil diabetes mellitus eller anden kontraindikation for corticosteroid terapi og aktiv ulcus.

Advarsler

Advarsel - Anvend kun Optune Lua behandlingssættet efter at have modtaget undervisning fra kvalificeret personale, f.eks. din læge, en sygeplejerske eller andet medicinsk personale der har fuldført et uddannelsesforløb afholdt af udstyrets fabrikant (Novocure GmbH Schweiz). Bed om at se et certifikat underskrevet af Novocure der angiver at de har fuldført et uddannelsesforløb. Din oplæring vil omfatte en detaljeret gennemgang af denne vejledning og øvelse i brugen af behandlingssættet. Desuden vil du blive oplært i, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer med behandlingen. Brug af Optune Lua behandlingssættet uden at have modtaget denne oplæring kan resultere i afbrydelser i behandlingen og i sjældne tilfælde forårsage øget udslæt i hovedbunden, åbne sår på hovedet, allergiske reaktioner eller endda elektrisk stød.

Advarsel - I tilfælde af hudirritation, der viser sig som rødme under transducer-arrays (et let udslæt), skal du tale med din læge, før du påbegynder behandling af hudirritation. Din læge kan anbefale, at du bruger håndkøbsmedicinsk, topisk steroid, når du udskifter transducer-arrays. Det vil hjælpe med at lindre din hudirritation. Hvis du ikke bruger denne creme, kan hudirritationen blive mere alvorlig og endda føre til hudskader, infektioner, smerter og vabler. Hvis det skulle ske, skal du høre op med at bruge den topiske steroidcreme og kontakte din læge. Din læge vil give dig en antibiotisk creme, som du skal bruge ved udskiftning af transducer-arrays. Hvis du ikke bruger denne creme, kan dine symptomer fortsætte, og din læge kan bede dig om at holde en pause fra behandlingen, indtil din hud er helet. Hvis du holder en pause i behandlingen, kan det mindske din chance for at reagere på behandlingen.

Advarsel – Alle serviceprocedurer skal udføres af kvalificeret og uddannet personale. Hvis du selv forsøger at åbne og servicere behandlingssættet, kan du forårsage skade på behandlingssættet. Du kunne også få elektrisk stød, hvis du rører ved udstyrets indvendige dele.

Advarsel – Udstyret må på ingen måde modificeres. – Anvend ikke Optune Lua-udstyret med andre dele eller tilbehør end de beskrevne i denne vejledning.

Forholdsregler

Forsigtig - Brug ikke dele, der ikke følger med Optune Lua behandlingssættet, eller som ikke er blevet sendt til dig af udstyrets fabrikant eller givet til dig af din læge. Brug af andre dele, produceret af andre selskaber eller for brug med andre enheder, kan skade udstyret. Dette kan medføre en afbrydelse af behandlingen.

Forsigtig - Brug ikke Optune Lua behandlingssættet, hvis nogen dele ser beskadigede ud (flængede ledninger, løse stik, løse stikkontakter, revner eller brist på plastkassen). Brug af skadede komponenter kan skade udstyret og medføre en afbrydelse af behandlingen.

Forsigtig - Undgå væske på Optune Lua-udstyret eller transducer-arrays eller brug i brusebad eller kraftig regn. Hvis udstyret bliver vådt, kan det gå i stykker og forhindre dig i at modtage behandling i den rigtige mængde tid. Hvis transducer-arrays bliver meget våde, vil det sandsynligvis medføre, at transducer-arrays løsner sig fra dit hoved. Hvis det sker, vil udstyret slukke og du skal udskifte transducer-arrays.

Forsigtig - Før du tilslutter eller frakobler transducer-arrays, skal du sørge for, at Optune Lua tænd/sluk-kontakten er på OFF.

Forsigtig - Brug ikke Optune Lua behandlingssættet, hvis du er gravid, hvis du har mistanke om at være gravid, eller prøver at blive gravid. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge prævention, når du bruger udstyret. Optune Lua behandlingssættet er ikke blevet testet hos gravide kvinder. Det er ukendt, hvilke bivirkninger udstyret kan forårsage hvis du er gravid, eller om det vil være effektivt.

Forsigtig - Tilslutningskablet kan udgøre fare for kvælning. Undgå at hænge tilslutningskablet om halsen.

Forsigtig - anbring ikke strømforsyningen hvor det er besværligt at fjerne stikket fra stikkontakten.

Forsigtig - Tildækning af strømforsyning kan medføre overophedning af strømforsyningen.

Bemærkninger

Bemærk! Optune Lua behandlingssættet og transducer-arrays vil aktivere metaldetektorer.

Bemærk! Du bør benytte Optune Lua behandlingssættet i mindst 12 timer i døgnet for at få den bedste behandlingsreaktion. Hvis du anvender Optune Lua behandlingssættet i færre end 12 timer i døgnet, vil dette mindske dine chancer for behandlingsreaktion.

Bemærk! Stands ikke med at anvende Optune Lua behandlingssættet, selvom du har brugt det færre end de anbefalede 12 timer i døgnet. Du bør kun stoppe med at bruge udstyret, hvis din læge beder dig om det. Standsning af behandlingen kunne mindske chancerne for, at du reagerer på behandlingen.

Bemærk! Hvis du planlægger fravær hjemmefra i mere end 1 time, skal du have et ekstra batteri og/eller en strømforsyning med dig, i tilfælde af, at det aktuelle batteri løber tør. Hvis du ikke medbringer et ekstra batteri og/eller en strømforsyning, kan du risikere at få en afbrydelse i din behandling. Pauser i behandlingen kan mindske dine chancer for at reagere på behandlingen.

Bemærk - sørg for altid at have mindst 12 ekstra transducer-arrays. Det vil række til du modtager den næste forsendelse af transducer-arrays. Husk at bestille flere transducer-arrays når der er mindst 12 ekstra transducer-arrays tilbage. Hvis du ikke bestiller transducer-arrays i tide, kan du risikere afbrydelse i din behandling.

Bemærk! Batterierne kan svækkes med tiden og skal udskiftes. Du ved, at dette er ved at ske, når den tid, som udstyret kan køre på et fuldt opladet batteri, begynder at blive kortere. Eksempelvis, hvis indikatoren for lavt batteri lyser inden for kun 1 time fra behandlingens start, skal du udskifte batteriet. Hvis du ikke medbringer et ekstra batteri og/eller en strømforsyning, kan du risikere afbrydelse i din behandling.

Bemærk - Du bør medbringe fejlfindingsguiden (sektion 12 af patientens brugervejledning) på ethvert tidspunkt. Denne guide er nødvendig for at sikre at Optune Lua behandlingssættet fungerer korrekt. Hvis du ikke benytter behandlingssættet korrekt, kan du risikere afbrydelse i din behandling.

Bemærk! Du må ikke blokere udstyrets ventilationsåbninger på forsiden og bagsiden af Optune Lua-udstyret. Hvis ventilationsåbningerne blokeres, kan det medføre, at udstyret overophedes og slukker, hvilket kan føre til afbrydelse i behandlingen. Hvis dette sker, skal du fjerne ventilationsåbningerne, vente 5 minutter og genstarte udstyret. I tilfælde af ventilationsåbninger der er blokeret af hår fra kæledyr eller støv, returneres udstyret for servicering.

Bemærk! Du må ikke blokere ventilationsåbningerne til batteriopladeren, der er placeret på venstre og højre side af batteriopladeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre, at opladeren bliver overophedet. Dette kan forhindre batterierne i at blive opladet. Hvis ventilationsåbningerne er blokeret af hår fra kæledyr eller støv, returneres udstyret for servicering.

Bemærk - Transducer-arrays er beregnet til engangsbrug og må ikke fjernes fra kroppen og senere anbringes igen. Hvis du anbringer en brugt transducer-array på brystkassen igen, vil den ikke klæbe korrekt til din hud og udstyret vil slukke.

Bemærk - Opbevar Optune Lua behandlingssættet uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

Bemærk - Udstyret har en ledning der kan snubles over når den er tilsluttet en stikkontakt.

2. KLINISKE FORDELE OG KLINISK DOKUMENTATION

Forventet klinisk fordel for patienten

Patienter der benytter Optune Lua sammen med lægemidler mod cancer levede længere, sammenlignet med patienter der alene benyttede lægemidler mod cancer.

Median progressionsfri overlevelse af avanceret (stadie IV) ikke-småcellet lungecancer behandlet med Optune Lua-udstyret sammen med Pemetrexed, fulgt af mindst en linje af forudgående kemoterapi, var mere end det dobbelte af den forventede median med Pemetrexed alene, baseret på en sammenligning af historiske kontrolldata. Der blev også set en signifikant øgning af tiden til progression af sygdommen (median overordnet overlevelse på 13,8 måneder sammenlignet med 8,3 måneder i historiske kontrolpatienter). Et års overlevelseshastighed var 57 % sammenlignet med historisk kontrol på 30 % rapporteret på Pemetrexed alene.

Klinisk erfaring - et multicenter klinisk forsøg har påvist at Optune Lua (tidligere NovoTTF-100L) behandling sammen med standard kemoterapi (Pemetrexed) var godt tolereret uden alvorlige bivirkninger relateret til udstyret hos nogen af de 42 behandlede patienter med en gennemsnits opfølgning på 6 måneder. Der blev ikke fundet hjerte- eller elektrisk felt-baserede bivirkninger hos nogen af patienterne. Der blev ikke fundet nogen øgning i relateret toksicitet. Overholdelse af behandlingen var meget høj med 85 % af patienterne modtagende behandling i gennemsnit 12 timer dagligt.

Der blev registreret mild til moderat kontakteksem under gel på transducer-arrays hos alle patienter under behandlingen, hvilket i de fleste tilfælde blev set som rødt udslæt. I sjældne tilfælde opstod der blister, kløe eller smerte under transducer-arrays. Hudreaktionen blev forbedret ved brug af topiske corticosteroider. I vedvarende tilfælde, blev tilstanden løst ved brug af lavdosis oral corticosteroider. Regelmæssig omplacering af transducer-arrays var påkrævet for at tillade kontinuerlig behandling.

3. HVILKE RISICI ER DER VED AT BRUGE OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS?

Der ses ofte hudirritation under ILE Transducer Arrays ved brug af Optune Lua behandlingssættet. Det ligner rødt udslet, små sår eller vabler på kroppen. Generelt forårsager det ikke uheldelige hudskader. Irritationen kan behandles med steroidcreme eller ved at omplacere ILE Transducer Arrays. Hvis du ikke bruger steroidcreme, kan hudirritationen blive mere alvorlig. Dette kan føre til sår, infektioner, smerter og vabler. Hvis det skulle ske, skal du standse med at bruge steroidcremen og kontakte din læge.

4. VIRKNINGSMEKANISME OG YDEEVNE

Din læge har udskrevet Optune Lua behandlingssættet for brug i hjemmet, da du er en god kandidat til behandling med udstyret.

Optune Lua behandlingssættet er et transportabelt udstyr. Den producerer elektriske felter, såkaldte tumorbehandlingsselter ("TTFields"). Transducer-arrays tilsluttet til udstyret leverer TTFields til brystkassen. TTFields er beregnet til at destruere lungecancer celler.


Udstyret og batteriet bæres i en skuldertaske. Du bør bruge dem så meget som muligt.

I denne vejledning refererer "Optune Lua behandlingssæt" til elektrisk feltgenerator (også kaldet "udstyret"), tilslutningskabel, strømforsyning, batteri, batterioplader og ILE Transducer Arrays.

Optune Lua er et transportabelt medicinsk udstyr der leverer elektriske felter, såkaldte "TTFields" til brystkassen ved hjælp af transducer-arrays. TTFields er beregnet til at destruere cancer celler.

Videnskaben - TTFields producerer elektrisk kraft der afbryder cancer cellers vækst i cellekulturer og i dyr ved at hæmme mikrotubulers polymerisering og medføre en forstyrrelse af celleintegritet under cytokinese/division (se Kirson et.al. Cancer Research 2004, Kirson et.al., PNAS 2007, Salzberg et.al., Onkologie 2008 og Kirson et.al., BMC Medical Physics 2009).

5. OVERSIGT OVER OPTUNE LUA BEHANDLINGSSÆTTET OG ILE TRANSDUCER ARRAYS

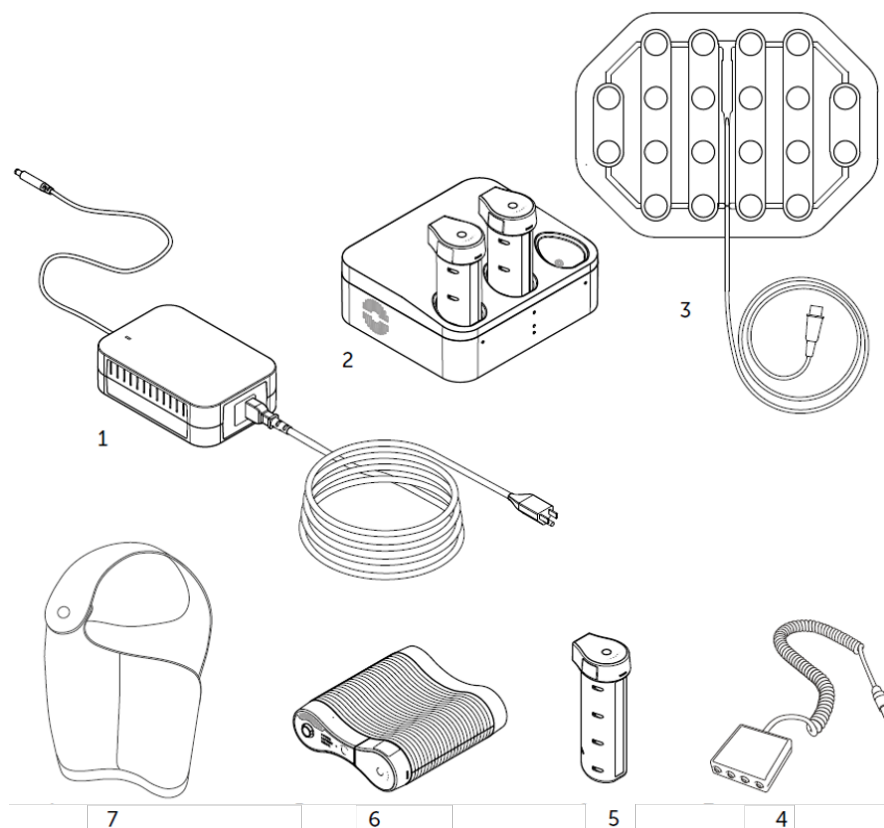


- | | |
|--|---|
| 1. Optune Lua strømforsyning | (SPS9200) |
| 2. Lader for Optune Lua | (ICH9100) |
| 3. ILE Transducer Array | (Lille: ILE1010, ILE1010W)
(Stor: ILE1030, ILE1030W) |
| 4. Optune Lua tilslutningskabel | (CAD9100) |
| 5. Optune Lua batteri | (IBH9200) |
| 6. Optune Lua elektrisk feltgenerator – udstyret | (TFT9200) |
| 7. Bæretaske | |


Optune Lua-udstyret er et automatisk system. TTFIELDS-behandling bør foregå så kontinuerligt som muligt (mindst 12 timer i døgnet, 7 dage om ugen). Afbrydelser af behandlingen skal holdes så korte som muligt.

Du må lære at sætte den i bæretaske, tilslutte batteri og betjene behandlingssættet. Følgende betjeningskomponenter giver dig mulighed for at gøre dette:

Bagside


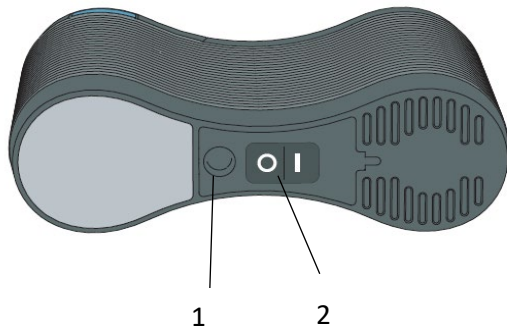


Front

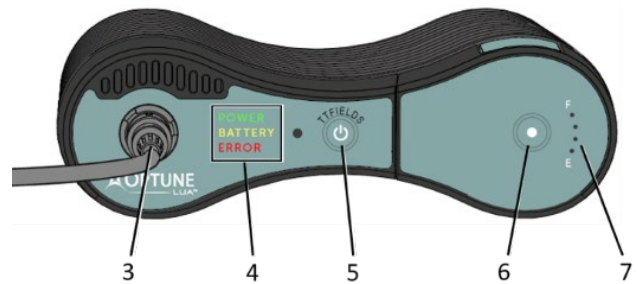


- 1 Strømforsyningsport
- 2 Optune Lua tænd/sluk-kontakt
- 3 Tilslutningskabel (CAD) bøsning
- 4 POWER / BATTERY / ERROR Indikatorer
- 5 TTFIELDS TÆND/SLUK-knap
- 6 Batteritestknap
- 7 Batterimåler

6. SYMBOLFORKLARING

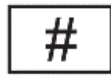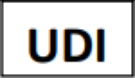	Følg brugsanvisningen
	Medicinsk udstyr
	Oplysninger om fabrikanten: Novocure GmbH, Business Village D4, Park 6/Platz 10, 6039 Root, Switzerland
	Modelnummer
	Delnummer
	Serienummer
	Batchnummer
	Unik udstyrsidentifikation Angiver udstyrets unikke udstyrs-identifikationsoplysninger.
	Fremstillingsdato
 ÅÅÅÅ-MM	Sidste anvendelsesdato/udløbsdato

	Forsigtig Læs brugsanvisningen for vigtige oplysninger såsom advarsler og forholdsregler
	Genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr "WEEE-bortskaffelse". Kontakt teknisk support for at sikre korrekt bortskaffelse af transducer-arrays, der er opbrugt eller ikke længere er i brug.
	Batterierne er lithium-ion-batterier. Kontakt teknisk support for at arrangere korrekt bortskaffelse af batterier, der er opbrugt eller ikke længere er i brug.
	Må ikke genbruges: ILE Transducer Arrays er til engangsbrug og bør ikke genbruges
	Indikerer at de pakkede produkter er sterile, at produkterne er steriliseret med bestråling og emballagen er et enkelt sterilt barriersystem
	Steril/steriliseringsmetode ILE Transducer Arrays steriliseres ved gammabestråling
	Må ikke gen-steriliseres
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget ILE Transducer Arrays må ikke anvendes, hvis emballagen er brudt.
	Beskyttes mod varme og radioaktive kilder Optune Lua-udstyret, tilhørende dele og ILE Transducer Arrays skal holdes på afstand af ekstrem varme og strålingskilder

IPxx	IP kode: Et kodesystem til angivelse af den grad af beskyttelse, som en indkapsling giver mod adgang til farlige dele eller vand. IP21: Strømforsyningen beskytter personers adgang til farlige dele med fingrene. Beskytter udstyret inden i kabinettet mod indtrængen af faste fremmedlegemer med en diameter på mindst 12,5 mm og mod indtrængen af lodret nedfaldende vanddråber. IP22: Udstyret beskytter personers adgang til farlige dele med fingrene. Beskytter udstyret inden i kabinettet mod indtrængen af faste fremmedlegemer med en diameter på mindst 12,5 mm og mod indtrængen af lodret faldende vanddråber, når kabinettet er vipet op til 15°.
	Opbevares tørt. Gå ikke ind i lokaler med høj luftfugtighed eller risiko for direkte udsættelse for vand, når du bærer udstyret. Benyt ikke udstyret hvis den ikke er i bæretasken. Udsæt ikke udstyret for direkte regn.
	Kun til indendørs brug
	Klasse II-udstyr iht. IEC 60601-1
	Anvendte del, type BF Symboliserer den del, der kommer i kontakt med patienten
	Temperaturinterval Må ikke udsættes for temperaturer under -5 °C eller over 40 °C
	Fugtighedsinterval. Må ikke udsættes for luftfugtighed under 15 % eller over 93 %

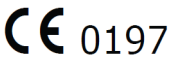	Skrøbeligt – skal behandles med forsigtighed
	P1 P2 N1 N2 sort og hvid kodning på tilslutningsboksen
	CE-mærket med bemyndiget organs nummer
	Europæisk autoriseret repræsentant MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany
	Importøroplysninger: Novocure Netherlands B.V., Prins Hendriklaan 26, 1075 BD, Amsterdam, The Netherlands
	TÆND/SLUK-kontakt for Optune Lua-udstyret og batterioplader: Når afbryderen er i position I, er udstyret tændt og lyser grønt. Når afbryderen er i position O, er udstyret slukket


7. FØR DU STARTER

- Du skal bruge fire (4) ILE Transducer Arrays (sterile) hver 3-4 dage for at opretholde behandlingen med Optune Lua behandlingssættet.
- Du skal sikre at du har den rette størrelse af transducer-arrays for din bryststørrelse.
- Sørg for, at du har et tilstrækkeligt lager af ILE Transducer Arrays til at holde dig i gang indtil dit næste besøg hos lægen.
- Inden brug af en ILE Transducer Array skal det sikres at emballagen er forseglet ved blidt at gnide emballagen mellem tommel- og pegefinger på alle fire sider. Emballagen skal være lukket på alle sider. Der må ikke være åbninger i emballagens forsegling. Hvis emballagen ikke er forseglet, kan transducer-array være skadet. En skadet transducer-array vil ikke fungere korrekt og kan medføre afbrydelse af udstyret. Brug ikke en ILE Transducer Array pakke, der tidligere har været åbnet.
- ILE Transducer Arrays er til engangsbrug og bør ikke genbruges
- Vedligeholdelse og rengøring - ILE Transducer Array leveres sterile til engangsbrug og kræver derfor ikke vedligeholdelse, rengøring eller desinfektion.
- ILE Transducer Arrays leveres sterile og er til engangsbrug.

8. BRUGERVEJLEDNING

8.1. UDTAGNING AF TRANSDUCER-ARRAYS FRA EMBALLAGEN

- ILE Transducer Array leveres sterile og må kun benyttes med Optune Lua behandlingssættet.
- ILE Transducer Arrays leveres i to dimensioner - lille og stor. Du skal bruge to store transducer-arrays på bagsiden og forsiden af brystkassen. Du skal bruge enten to store eller to små transducer-arrays på begge flanker (på siderne under armhulerne), afhængig af din bryststørrelse.
- Åbn den gennemsigtige emballage på hver af de fire (4) ILE Transducer Arrays ved forsigtigt at trække de modsatte kanter af emballagen fra hinanden. Hold transducer-array som vist på illustrationen

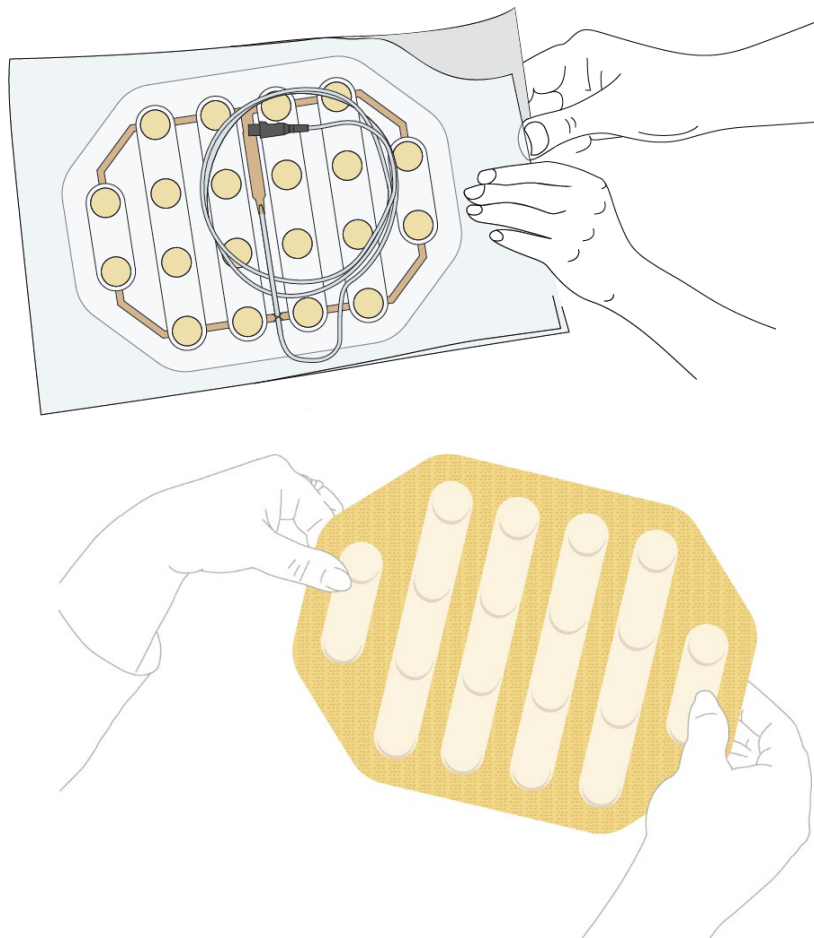


8.2. FORBEREDELSE AF HUDEN FOR PLACERING AF TRANSDUCER-ARRAY

- Vask din hud på bryst og flanker med en mild sæbe.
- Fjern evt. klæbende stoffer fra tidligere transducer-arrays fra huden ved aftørring med babyolie.
- Hvis du har megen hårvækst, barberes kroppen med en elektrisk barbermaskine. Sørg for at der ikke efterlades stubbe.
- Aftør huden med 70 % alkohol (medicinsk kvalitet - enhver fabrikant).
- Hvis huden er rød, påføres steroidcreme som udskrevet af din læge.
- Hvis du har skader på din hud behandles de som instrueret af den behandlende læge.
- Vent mindst 15 minutter og aftør igen huden forsigtigt med 70 % alkohol for at lette klæbningen af transducer-arrays på huden.


8.3. PLACERING AF TRANSDUCER-ARRAYS

For hver 3-4 dage udføres følgende for omplacering af dine transducer-arrays:


- 1) Fjern transducer-arrays fra bryst og flanker ved at trække den medicinske tape af huden.
Bemærk den sorte og hvide farve på tilslutninger for transducer-arrays - hvert par af samme farve placeres modsatrettet på din krop.
- 2) Fjern transducer-array foring fra første transducer-array.
- 3) Anbring transducer-array på brystet på samme sted som før, men forskudt 2 cm for at undgå røde områder.
- 4) Anbring de tre andre ILE Transducer Arrays på samme måde.
- 5) Du skal bede en ven eller familiemedlem om hjælp til placering af transducer-array på ryggen.
- 6) Tryk hele kanten af transducer-array båndet mod huden.

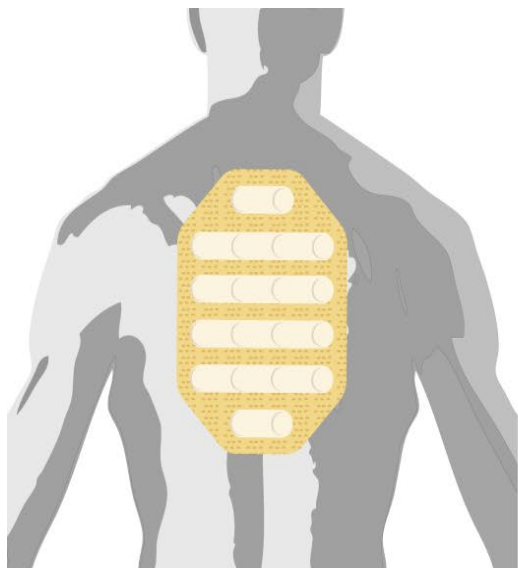

BAGSIDE - STOR ILE

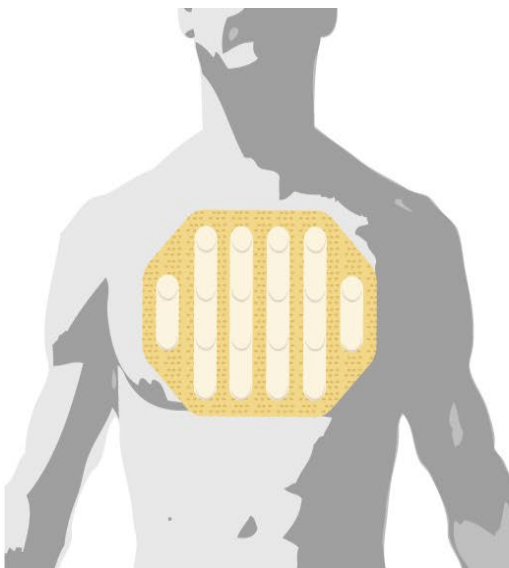

FORSIDE - STOR ILE

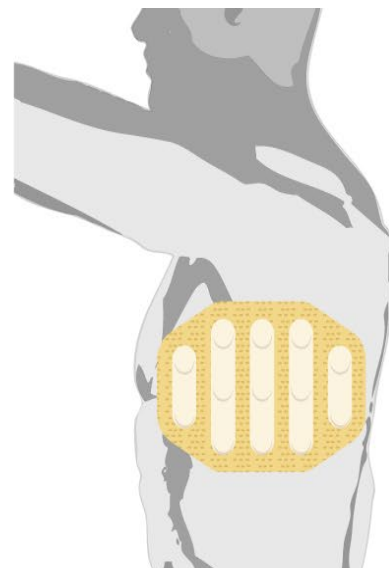

SIDE - LILLE/STOR ILE

8.4. TILSLUTNING AF ILE TRANSDUCER ARRAYS TIL OPTUNE LUA-UDSTYRET

- Tilslut de fire sorte og hvide transducer-array tilslutninger til respektive sorte og hvide bøsninger på Optune Lua tilslutningsboksen.
- Sørg for at transducer-arrays er tilsluttet som følger:
 - Forreste transducer-arrays (stor) tilsluttet til P1 (sort)
 - Bagerste transducer-arrays (stor) tilsluttet til N1 (sort)
 - Højre transducer-array (enten stor eller lille) tilsluttet til P2 (hvid)
 - Venstre transducer-array (enten stor eller lille) tilsluttet til N2 (hvid)
- Tryk fast for at sikre, at stikkene er skubbet helt ind.
- Saml ledningerne på transducer-array og bind dem fast med lidt tape efter behov.
- Du kan fastgøre tilslutningskablet til dit bælte.



8.5. TILSLUTNINGSKABEL

Tilslutningskablet er den elastiske spiralledning, der løber fra tilslutningsboksen til udstyret. De fire transducer-array-stik (2 sorte og 2 hvide) sættes i tilslutningsboksen. Sorte og hvide mærkninger matcher transducer-arrays position på kroppen.

Følg instruktionerne for tilslutning til udstyret:

- Det er vigtigt, at pilen på tilslutningskablet vender opad og er på linje med pilen på udstyrets tilslutningsboks' bøsning.
- Før tilslutningskablet ind, indtil du hører et klik. Det angiver at tilslutningskablet er på plads.



8.6. START OG STOP AF UDSKYRET

For start af behandling:

ILE Transducer Arrays skal fastgøres på din krop

1. Tilslut ILE Transducer Arrays i tilslutningsboksen (se afsnit 8.4 og 8.5)
2. Tilslut tilslutningskablet til udstyret, med pilen på stikket justeret efter pilen på bøsningen (se afsnit 8.5).
3. For at starte behandlingen, skal du tilslutte en strømkilde - enten et opladet batteri (afsnit 8.7) eller en strømforsyning (afsnit 8.9) til udstyret.
4. Tænd for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.




Vent ca. 10 sekunder for udførelse af selvtest, indtil grøn "POWER" indikator lyser.



BEMÆRK: Hvis der er indsat et opladet batteri (og ingen strømforsyning tilsluttet), lyser den grønne "BATTERY" indikator. Hvis udstyret er tilsluttet til en strømforsyning, drives den af strømforsyningen og "BATTERY" indikatoren slukker.



Aktiver TTFIELDS ved at trykke på TTFIELDS TÆND/SLUK-knappen.

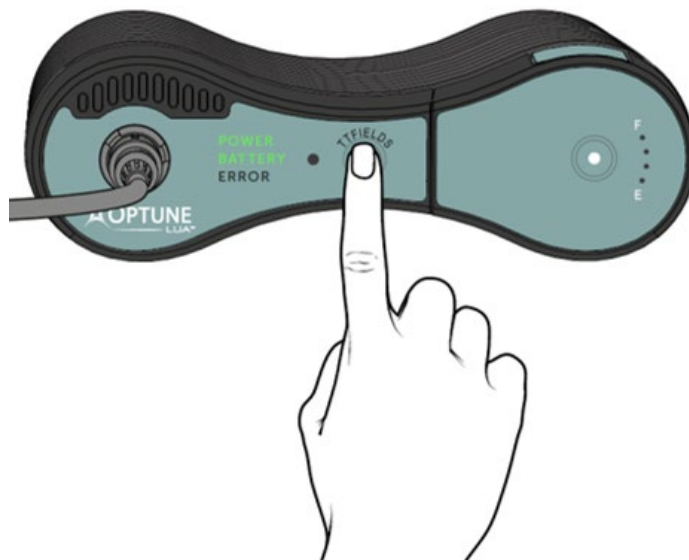

"TTFIELDS" indikator, over TTFIELDS TÆND/SLUK-knappen, skal lyse blå og forblive tændt når behandling er ON.

BEMÆRK: Hvis blå indikator ikke lyser, er behandling OFF, og du bør kontrollere opsætningen og genstarte proceduren. Hvis den grønne indikator ikke lyser efter dette, henvises til fejlfindingsguide (afsnit 12). Hvis problemerne fortsætter, kontaktes Novocure teknisk support (afsnit 13).

Grønne, blå og røde indikator dæmpes automatisk i et mørkt lokale. Den røde "ERROR" indikator lyser med permanent niveau.

Hvis TTFIELDS-knappen ikke trykkes inden for 10 sekunder efter tænding af udstyret, lyder et notifikationssignal og blå "TTFIELDS" indikator blinker, og indikerer at behandlingen er OFF. Dette er en påmindelse om, at behandlingen skal påbegyndes. Der skal trykkes på TTFIELDS-knappen én gang for at afbryde alarmer og igen for at starte behandlingen. Den blå "TTFIELDS" indikator vil herefter lyse.


STOP AF BEHANDLINGEN:

I hver af følgende situationer kan behandlingen standses:

A. Når udstyret kører korrekt og du skal holde en pause:

1. Stands behandlingen ved at trykke på TTFields TÆND/SLUK-knappen. TTFields terapien stopper, indikeret med blå "TTFIELDS" indikator slukket.

BEMÆRK: Udstyret er stadig tændt.

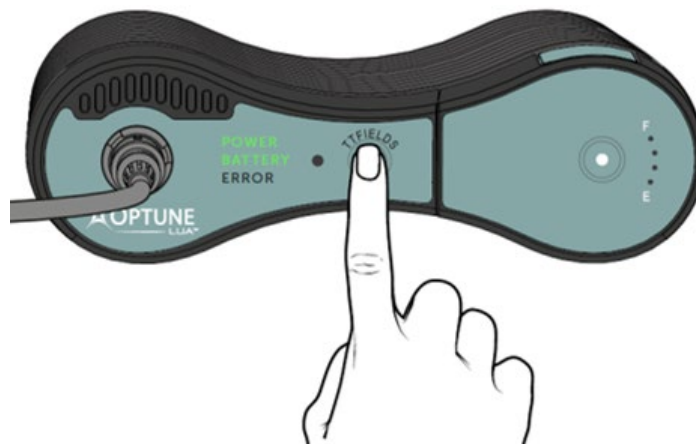

2. Sluk for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.



B. Ved en opstået fejltilstand:

Hvis der opstår fejl, slukker udstyret for behandlingen og udsender en høj bippende alarm. Den røde "ERROR" indikator lyser (som vist herunder).

1. Tryk på TTFields-knappen for at afbryde alarmen. Den røde "ERROR" indikator slukker. Hvis alarmen fortsætter, fortsættes med næste trin for afbrydelse af alarmen.
2. Sluk for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.



C. Når indikatoren for lavt batteri lyser:

Når batteriet er opbrugt (efter ca. en time), lyder en alarm, TTFields effekten afbrydes (udstyret stopper behandlingen) og der lyder en alarm.

BEMÆRK: Alarmen lyder identisk ved en opstået fejl. Men i dette tilfælde vil både den gule "BATTERY"- og den røde "ERROR" indikator lyse.

- 1 Tryk på TTFields-knappen for at afbryde alarmen. Den røde "ERROR" indikator slukker.
- 2 Sluk for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.
- 3 Udskift batteriet (se afsnit 8.7).



8.7. INDSÆTNING OG UDTAGNING AF BATTERIET

Optune Lua behandlingssættet leveres med fire opladelige batterier. Optune Lua driften kræver et batteri ad gangen. De tre andre batterier skal blive i batteriopladeren.

Hvis du planlægger at være væk fra hjemmet i mere end en time, skal du medbringe ekstra batterier.

- 1 Skyd batteriet ind i udstyret.
- 2 Tryk forsigtigt batteriet ned til der høres et klik, der indikerer at det er låst.

BEMÆRK: Pas på ikke at lade batteriet falde på plads eller tvinge det ind i batteriåbningen.

- 3 Udskift batteriet hver gang det er opbrugt (når grønne "BATTERY" indikator skifter til gul).



Tryk forsigtigt ned for at låse batteriet på plads.



For at fjerne batteriet fra holderen skal du trykke på begge blå knapper på sider af batteriet og løfte det op.

Genoplad batterierne i opladeren (se afsnit 8.8) i to til fire timer. Efter fjernelse fra laderen, bevarer batterierne det meste af deres ladning i flere dage, men den vil gå tabt efter længere tid. Det skader ikke batterierne at beholde dem i laderen efter de er fuldt opladede, så de kan efterlades der når de ikke behøves.

Du kan lade og bruge batterierne mange gange over ca. seks til ni måneder. Med tiden afkortes den tid batterierne kan drive udstyret (inden den gule lav "BATTERY" indikator tænder og der lyder en alarm). Hvis tiden fra behandlingsstart med fuldt opladet batteri til alarm for lavt batteri, lydalarm og rød "ERROR" indikator lyser, falder under 50 minutter kontaktes teknisk support (afsnit 13) for nye batterier.

"BATTERY" indikator skifter fra grøn til gul når batteriets ladning falder under en grænseværdi. Det er en indikation af, at batteriet skal oplades snarest. Behandlingen vil fortsætte mens den gule lav "BATTERY" indikator lyser, indtil lydalarmeren aktiveres og rød "ERROR" indikator lyser. Når dette sker vil behandlingen stoppe og udstyret skal slukkes og batteriet udskiftes.

Når "BATTERY" indikator skifter til gul, er der to måder at fortsætte behandlingen:

A. Første mulighed:

Hvis du er i nærheden af en stikkontakt, tilsluttes strømforsyningen til stikkontakten for fortsat levering af terapi. Dette kan bruges, før batteriet er helt opbrugt, og inden udstyret udløser alarmen. Følg instruktionerne:

- 1 Tilslut strømforsyningen bag på Optune Lua-udstyret (afsnit 8.9). Behandling fortsætter mens udstyrets indikator angiver at den ikke længere drives af batteri.
- 2 Tryk på de to blå knapper på begge sider af batteriet og fjern batteriet ved at løfte det ud af udstyret.
- 3 Oplad batteriet (afsnit 8.8).
- 4 Fortsæt behandlingen med forsyning fra stikkontakten.

B. Anden mulighed:

Hvis du ikke er i nærheden af en stikkontakt, følges instruktionerne for udskiftning af batteri:

BEMÆRK: Hvis batteriet er fuldt afladet, startes fra trin 2


1. Tryk på TTFields-knappen for at afbryde behandlingen.
2. Sluk for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten (på bagsiden af udstyret).
3. Tryk på de to blå knapper på begge sider af batteriet og fjern batteriet ved at løfte det ud af udstyret.
4. Vælg et andet fuldt opladet batteri.
5. Skyd det fuldt opladede batteri ind i udstyret.
6. Tryk forsigtigt batteriet ned til der høres et klik, der indikerer at det er låst.
7. Se afsnit 8.8 for brug af batterimåleren.
8. Tænd udstyret på tænd/sluk-kontakten og vent ca. 10 sekunder mens udstyret gennemfører en selvtest.
9. Start behandling ved tryk på TTFields-knappen (afsnit 8.6).
10. Indsæt det brugte batteri i batteriopladeren for opladning (afsnit 8.8).

8.8. OPLADNING AF BATTERIET

Kontrol af batterimåler

Mens du anvender Optune Lua behandlingssættet, skal du kontrollere, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Kontrol af batteriet vil ikke forstyrre eller standse din behandling.

For at kontrollere batteriets kapacitet skal du trykke én gang på knappen på toppen af batteriet. Batterikapaciteten vises på måleren til højre for knappen. Måleren viser fra Full (F) til Empty (E), ligesom benzinmåleren i en bil.

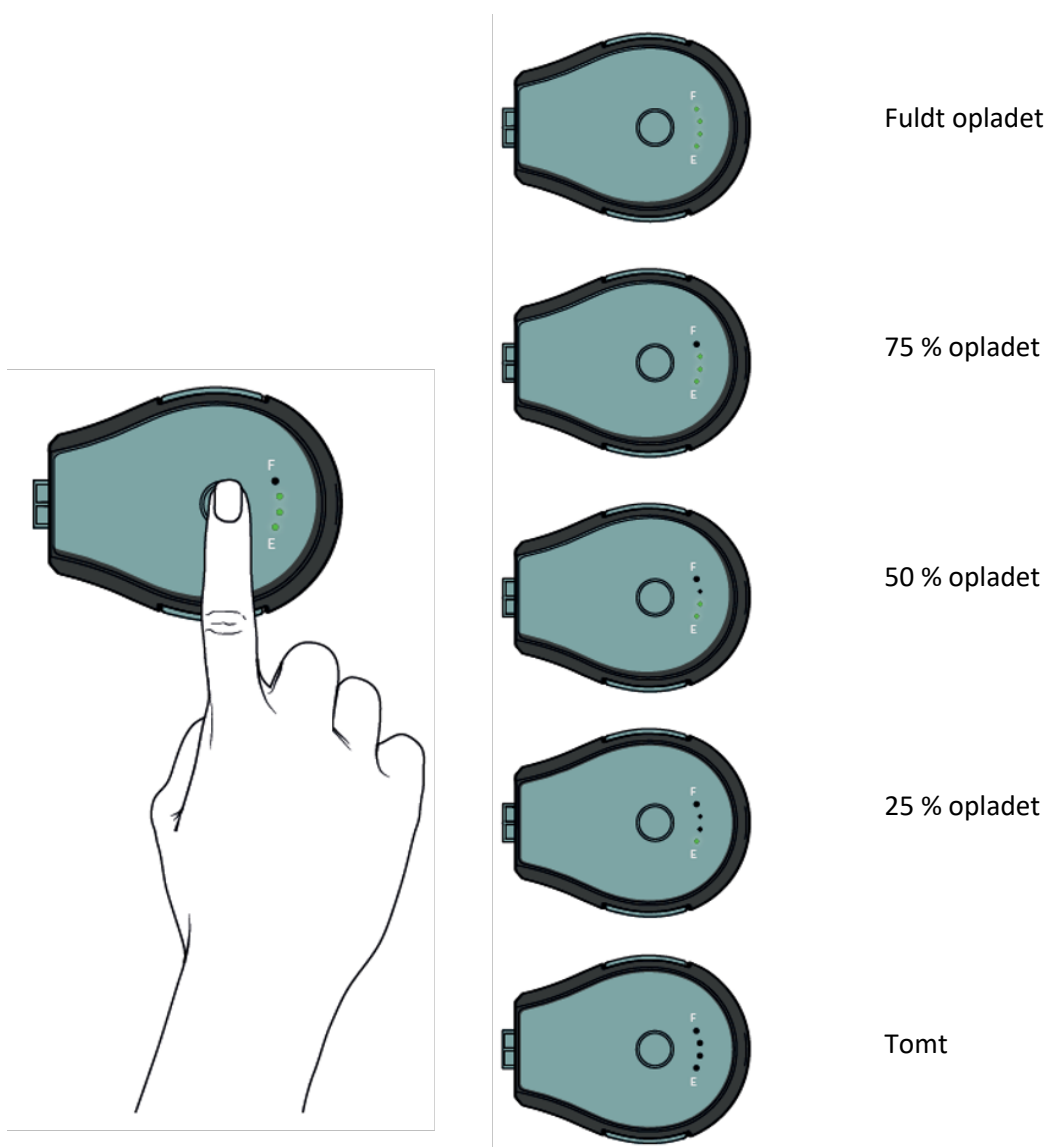

Batteriopladeren genoplader brugte batterier. Batteriopladeren bruger strøm fra en almindelig stikkontakt. Hvert batteri er anbragt i riller der tilslutter direkte til laderen.

Før du oplader batterierne, skal du sætte opladerens netledning i en almindelig stikkontakt og tænde tænd/sluk-kontakten på bagsiden af opladeren. De forreste lamper på laderen tænder under selvtest og herefter lyser den lille indikator midt på frontpanelet grønt og angiver at der er tilsluttet strøm.


Genopladning af et brugt batteri:

1. Placer det brugte batteri i en af de tre åbninger i toppen af opladeren. Skyd batteriet ind til det er helt på plads.
2. Lyset lige foran den åbning, hvor batteriet er sat i, blinker grønt. Dette indikerer at batteriet lader. Den grønne lampe vil blinke hurtigere når batteriet er opladet til 95 % af dets kapacitet. Du kan også kontrollere batterimåleren under ladning for information om batteriets ladestand.
3. Når batteriet er fuldt opladet (ca. 2 til 4 timer), skifter opladningslampen fra at blinke grønt til konstant grønt. Det grønne lys forsvinder, når batteriet tages ud af holderen eller opladeren afbrydes fra stikkontakten.

Hvis en lampe på forsiden skifter til rødt, indikerer det en fejl ved batteri eller lader og du bør kontakte teknisk support for hjælp. Brug ikke et batteri, hvis der viser sig et rødt lys på opladeren.


Lad batterierne blive i opladeren, selv når de er fuldt opladede. Dette skader ikke batterierne

1. Tænd/sluk-kontakt
2. Netledning

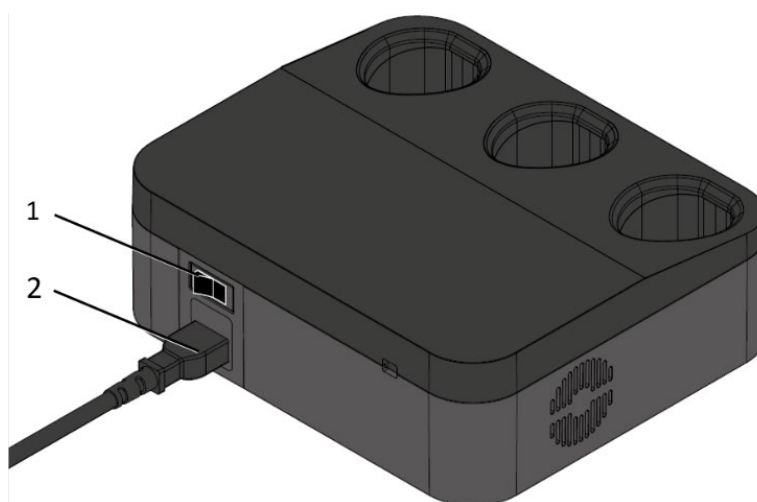

Batterioplader bagside viser tænd/sluk-kontakten og tilslutning for netledning

1. Batteriopladningsrille
2. Strømindikator
3. batteriopladningsindikator

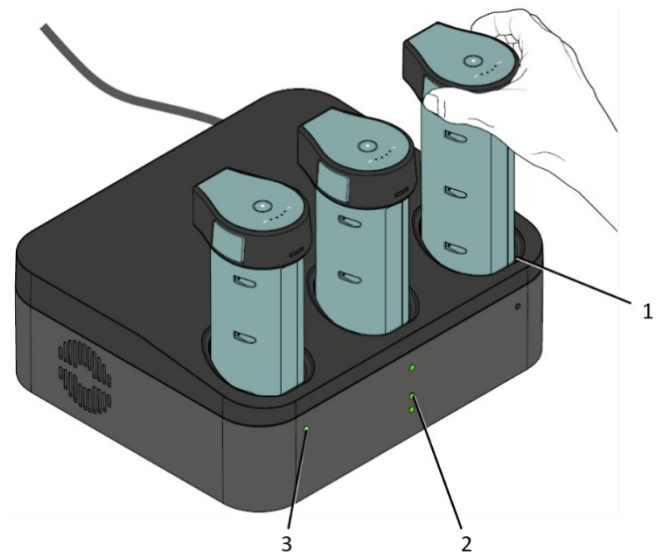

Frontalbillede af batteriopladeren, der viser, hvordan batterierne sidder i opladeren

BEMÆRK: Opladeren er ikke beregnet til brug i nærheden af brandfarlige præparater.

8.9. BRUG AF INDSÆTTELIG STRØMFORSYNING

Hvis du har i sinde at blive på samme sted i et stykke tid, f.eks. når du sover, kan du benytte indsættelig strømforsyning i stedet for batterierne. I modsætning til batterierne er der ingen begrænsning for, hvor længe udstyret kan fungere, når du bruger den indsættelige strømforsyning. Indsættelig strømforsyning fungerer med enten amerikansk (120 V VAC) eller europæisk (230 V VAC) stikkontakt.

BEMÆRK: Det er normalt, at strømforsyningen bliver varm, når den er i brug. Hvis strømforsyningen bliver for varm ved berøring, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte teknisk support (Afsnit 13).

Når udstyret har et batteri isat, og også er tilsluttet til stikkontakt, bruger den stikkontakten som foretrukne strømkilde. Når netledningen tilsluttes mens udstyret drives af batteri, skifter udstyret automatisk fra batteri til stikkontakt.

Tilslutning af indsættelig strømforsyning

1. Tilslut strømforsyningen til en standard stikkontakt.

BEMÆRK: Du behøver ikke at fjerne batteriet fra udstyret for at bruge indsættelig strømforsyning.

Bemærk, at et batteri i udstyret ikke oplades, når det er tilsluttet indsættelig strømforsyning.

Hvis TTFields er aktiveret, behøver du ikke at slukke for dem.

2. Tilslut strømforsyningen til strømforsyningsporten på bagsiden af udstyret (ved siden af tænd/sluk-kontakten).
3. Hvis TTFields er aktiveret, skifter udstyret til strømforsyningen uden afbrydelse af behandlingen.
4. Hvis udstyret er slukket, tænd udstyret på tænd/sluk-kontakten og vent ca. 10 sekunder mens udstyret gennemfører en selvtest. Tryk herefter på TTFields-knappen for at starte behandlingen (som beskrevet i afsnit 8.6).

Afbryd indsættelig strømforsyning og vende tilbage til batteristrøm

Sørg for, at et opladet batteri er korrekt indsat i udstyret, før du fjerner strømforsyningen. Hvis TTFields er aktiveret, behøver du at slukke for dem, før du fjerner strømforsyningen. Udstyret vil lukke ned og genstarte på batteridrift når strømforsyningen fjernes. I dette tilfælde skal du trykke på TTFields-knappen for start af behandling (som beskrevet i afsnit 8.6), efter gennemført selvtest.

1. Fjern strømforsyningskablet fra bagsiden af udstyret. Efter ca. otte sekunder lyser batteriindikatoren "BATTERY" på forsiden.
2. Opbevar den indsættelige strømforsyning til senere brug.

8.10. AFBRYDELSE FRA Udstyret

Der er to måder at afbryde udstyret for en pause i behandlingen:

- At tage tilslutningskablet ud af udstyret.
- At trække transducer-arrays ud af tilslutningskablet:

At tage tilslutningskablet ud af udstyret

1. Stands behandlingen ved at trykke på TTFIELDS-knappen.
2. Sluk for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.
3. Hold tilslutnings muffe og træk tilslutningskabel ud fra bøsningen.

FORSIGTIG! Du må ikke trække i ledningen!

Du kan nu bevæge dig rundt uden udstyret, men du vil stadig være forbundet med tilslutningskablet og boksen.

For at starte behandlingen igen efter en pause:

1. Sæt tilslutningskablet i tilslutningskabelporten med pilen pegende opad.
2. Tænd for udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten. Vent ca. 10 sekunder mens udstyret gennemfører selvtest.
3. Aktiver TTFIELDS ved at trykke på TTFIELDS-knappen.

At trække transducer-arrays ud af tilslutningskablet

Hvis du vil holde en pause i behandlingen og helt afbryde forbindelsen til udstyret, skal du tage ILE Transducer Array ud af tilslutningskabelboksen. De fire transducer-arrays forbindes til tilslutningskabelboksen (som beskrevet i afsnit 8.5). Tilslutningskablet forbliver i udstyrets bøsning.

- 1 Stands behandlingen ved at trykke på TTFields-knappen.
- 2 Sluk for Optune Lua-udstyret ved hjælp af tænd/sluk-kontakten.
- 3 Aftag de fire transducer-arrays fra tilslutningsboksen ved at trække tilslutningerne ud.

BEMÆRK: Du skal måske vrikke lidt med kablerne til transducer-arrays for at løsne dem. Du må ikke trække i ledningen.




Genstart behandlingen:

- 1 Tilslut de fire transducer-arrays til de matchende farver (sort eller hvid) i tilslutningsboksen.
- 2 Tænd udstyret på tænd/sluk-kontakten og vent ca. 10 sekunder mens udstyret gennemfører en selvtest.
- 3 Aktiver TTFields ved at trykke på TTFields-knappen.

8.11. TRANSPORT AF UDS TYRET

Både elektrisk feltgenerator og batteriet kan anbringes i bæretasken. Tasken kan bæres på tre måder: ved håndtaget øverst, over skulderen, cross-body med en fastgjort bærerem eller som rygsæk som vist herunder.

BEMÆRK: Anbring ikke udstyret i en andre tasker. Optune Lua-udstyret har en blæser indvendigt der kræver luftflow. Den taske, der følger med udstyret, er designet til at sikre korrekt luftgennemstrømning. Hvis du anbringer udstyret i en taske uden ordentlig luftgennemstrømning, kan det blive overophedet og stoppe behandlingen. Hvis dette sker hører du en alarm.

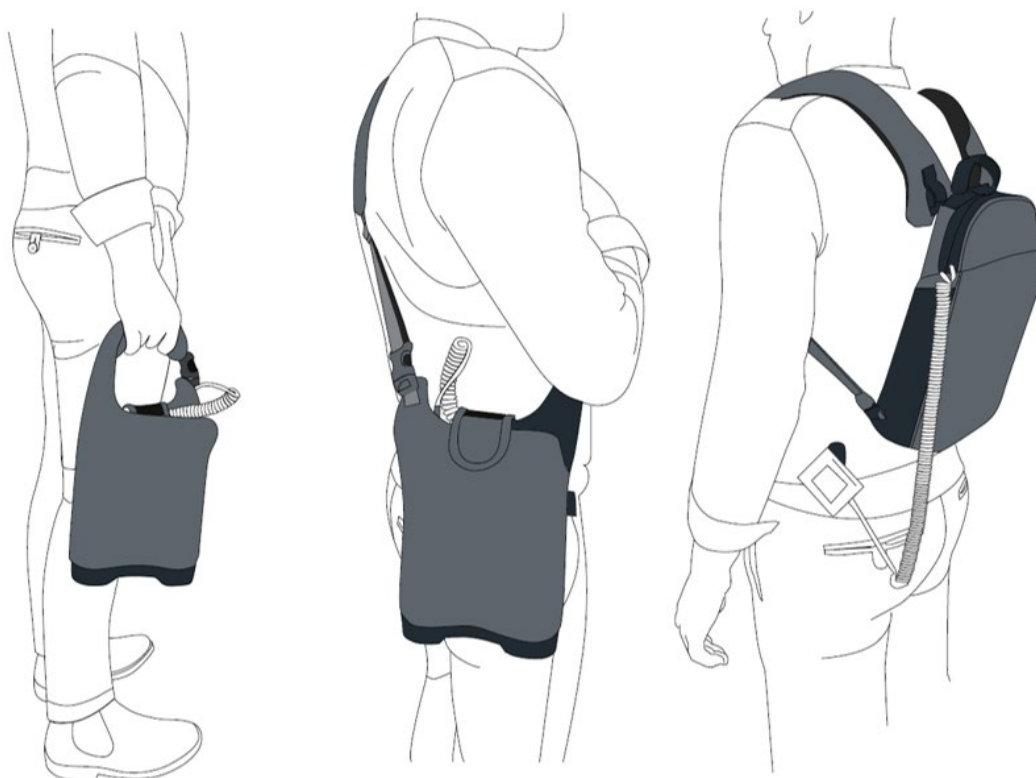

9. OMGIVELSESBETINGELSER FOR NORMAL DRIFT, OPBEVARING OG TRANSPORT

Driftsforhold

Alle komponenter i behandlingssættet skal normalt anvendes under de nedenfor specificerede betingelser:

- Hovedsageligt til brug i hjemmet
- Kun til indendørs brug (lader, strømforsyning)
- Må ikke anvendes i bruser, badekar eller håndvask, eller i kraftig regn.
- De må heller ikke anvendes i nærheden af brændbare præparater
- Kan tages på gulvet uden risiko, men kan ikke længere forventes at fungere.

Betingelser for synlighed: enhver

Rengøring: Alle eksterne komponenter i behandlingssæt kan rengøres jævnligt med en fugtig klud for at fjerne støv og normalt snavs.

Fysiske driftsbetingelser for alle komponenter i behandlingssættet:

- Temperaturinterval: -5°C til +40°C (23°F til 104°F)
- Relativ fugtighedsinterval: 15-93 %
- Omgivende trykinterval: 700-1060 hPa

Opbevaringsbetingelser

- Temperaturinterval: -5°C til +40°C (23°F til 104°F) for udstyret og yderligere dele
- Temperaturinterval: 5°C til +27°C (41°F til 80°F) for transducer-arrays

Transportbetingelser

Transport af udstyret, ILE Transducer Arrays og ekstra dele skulle være muligt via luft- eller landtransport under vejrbeskyttede forhold som specificeret nedenfor:

- Temperaturinterval: -5°C til +40°C (23°F til 104°F)
- Maksimal relativ luftfugtighed 15-93 %
- Må ikke udsættes direkte for vand

10. FORVENTET HOLDBARHED

Den forventede levetid for Optune Lua-udstyret og alle komponenter i behandlingssættet er 5 år.

Den forventede levetid for ILE Transducer Arrays er 9 mdr. ILE Transducer Arrays har en udløbsdato. Du må ikke anvende transducer-arrays efter udløbsdatoen.

11. BORTSKAFFELSE

Kontakt Novocure for at arrangere korrekt bortskaffelse af brugte transducer-arrays.

De må ikke smides i skraldespanden.

Novocure kontakter de lokale myndigheder for at bestemme den korrekte bortskaffelsesmetode for potentielt biofarlige dele.

12. FEJLFINDING

Problem	Mulige årsager	Afhjælpninger
Udstyrets strømindikator lyser ikke, selv om der er tændt for udstyret	1. Udstyret er ikke tilsluttet strømkilden 2. Batteriet er afladet 3. Batterifejl 4. Hvis strømforsyning - ikke tilsluttet rigtigt til stikkontakt 5. Fejl på udstyret 6. Fejl på strømforsyning	1. Hvis på batteri - kontroller batterimåler for at kontrollere, at det ikke er opbrugt. Hvis dette er tilfældet - erstat det med et fuldt opladet batteri eller strømforsyningen. 2. Kontroller, at både udstyret og strømkilden er korrekt tilsluttet, og prøv igen. 3. Undersøg om alle forbindelser er i orden. Intet må se ud til at være beskadiget eller ødelagt på nogen måde. 4. Hvis udstyret ikke kan tændes, hverken med batteri eller strømforsyning, eller hvis noget ser ud til at være beskadiget, må du ikke benytte udstyret. 5. Kontakt teknisk support
Ethvert kabel løsnet transducer-array/ tilslutningskabel/ udstyret	1. For stor fysisk kraft på kablerne 2. Fejl på udstyret	1. Afbryd notifikationssignalet ved at trykke på TTFields-knappen 2. Evaluer tilslutninger. Hvis intakte - tilslut dem igen, og genstart terapien. 3. Hvis noget ser beskadiget ud eller ikke kan tilsluttes korrekt, skal du ikke forsøge at anvende udstyret. 4. Kontakt teknisk support
Udstyret tabt eller våd	Forkert brug	1. Tryk på TTFields-knappen for at standse behandlingen. 2. Sæt tænd/sluk-kontakten på OFF 3. Afbrud strømforsyningen 4. Kontakt teknisk support
Udstyrets alarm aktiveret, og indikator for lavt batteri lyser gult	1. Lavt batteri 2. Udstyret er tændt, men behandlingen er ikke aktiveret	1. Udskift batteriet som beskrevet i afsnit 8.7 2. Tænd for behandlingen 3. Tryk på TTFields-knappen for at afbryde alarmen 4. Vent nogle sekunder og tryk på TTFields-knappen igen 5. Hvis de tre blå lys omkring TTFields-knappen lyser - behandlingen er nu blevet sat i gang Hvis notifikationssignalet udløses igen

Problem	Mulige årsager	Afhjælpninger
		efter få minutter: 1. Afbryd notifikationssignalet og sluk helt for udstyret 2. Tag alle stik ud af stikkontakterne, og sørg for, at der ikke er noget, der virker skadet eller defekt. Hvis noget er - udskift skadede dele inden det forsøges at tænde udstyret. 3. Gentilslut alt udstyr i den rette orden og start udstyret igen. Kontroller, at selvtest er gennemført, og tryk på TTFields-knappen. 4. Kontroller at ventilationsåbningerne på udstyret ikke er blokerede 5. Hvis du ligger ned, rejs dig og bevæg kroppen. 6. Sørg for at transducer-arrays er sikkert anbragt på kroppen, brug tape efter behov. 7. Genstart behandlingen 8. Hvis alarmen fortsætter, afbryd udstyret og tilkald teknisk support
Udstyrets alarm blinker, "TTFIELDS" indikator over TTFields-knappen blinker blå og lydalarm afgiver 3 korte lyde, stopper i 2,5 sekunder og herefter 3 lyde igen.	Timeout for behandling	Notifikationssignalet på udstyret vil lyde hvis det er tændt, men der ikke startes behandling inden for 10 minutter. Dette er en påmindelse om, at du skal starte terapien, og ikke et signal om funktionsfejl. 1. Sluk for notifikationssignalet ved at trykke på TTFields-knappen, vent derefter et par sekunder, og tryk på TTFields-knappen igen, for at påbegynde behandlingen. Den blå indikator omkring TTFields-knappen blinker og forbliver derefter tændt for at indikere, at terapien nu er i gang. 2. Hvis du oplever andre alarmer henvises til fejlfindingsbeskrivelser i dette afsnit.
Indikator for lavt batteri forbliver tændt efter udskiftning af batteri	1. Opladerfejl 2. Batterifejl 3. Fejl på udstyret	1. Udskift batteri med et fuldt opladet batteri 2. Hvis problemet ikke er løst - tilkald teknisk support

Problem	Mulige årsager	Afhjælpninger
Når du tænder for udstyret, lyder et kontinuerligt notifikationssignal, og alle lamper forbliver tændte på ubestemt tid. Udstyret gennemfører ikke selvtest	1. Udstyret er overophedet 2. Fejl på udstyret 3. Fejl på strømkilde	1. Sluk helt for udstyret på tænd/sluk-kontakten. 2. Kontroller, at udstyret ikke føles meget varmt ved berøring. 3. Forbind udstyret til en anden strømkilde, og prøv at tænde for udstyret igen. 4. Hvis udstyret ikke kan tændes, hverken med batteri eller strømforsyning, eller hvis noget ser ud til at være beskadiget, tilkaldes teknisk support.
Rødme i huden under transducer-arrays	Almindelig bivirkning	1. Brug steroidcreme, ordineret af din læge, når du udskifter transducer-arrays. 2. Placer transducer-arrays på et område, der er forskudt 3/4 inches (2 cm) fra den sidste placering (så den klæbende gel befinder sig mellem de røde mærker). Hvis rødmen forværres: 1. Tal med din behandlende læge
Vabler under transducer-arrays	Sjælden bivirkning	Tal med din behandlende læge
Kløe under transducer-arrays	Sjælden bivirkning	1. Brug steroidcreme, ordineret af din læge, når du udskifter transducer-arrays. 2. Placer transducer-arrays på et område, der er forskudt 3/4 inches (2 cm) fra den sidste placering (så den klæbende gel befinder sig mellem de røde mærker). Hvis kløen forværres: 1. Tal med din behandlende læge
Smerter under transducer-arrays	Sjælden bivirkning	1. Stands behandlingen 2. Tal med din behandlende læge

13. ASSISTANCE OG INFORMATION

Teknisk support

Kontakt supporttekniker for apparatet for at få teknisk support. Hans/hendes kontaktoplysninger udleveres separat til dig.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med din supporttekniker for apparatet, kan du benytte EMEA Novocure teknisk support-email: SupportEMEA@novocure.com eller patientinfoEMEA@novocure.com.

Beskriv venligst problemet og afgiv den følgende information ved kontakt:

NAVN (Fornavn/efternavn)

EMAIL

TELEFON (valgfri)

LAND:

SPØRGSMÅL:

Hav også udstyrets serienummer parat når du kontakter DSS eller teknisk support. Serienummeret kan findes nederst på udstyret (TTFields generator).

Klinisk support

Hvis du mærker nogen ændringer i dit helbred eller bivirkninger fra behandlingen, skal du straks kontakte din læge.

Indrapportering

Hvis du oplever en alvorlig hændelse, som opstår under brugen af Optune Lua behandlingssættet eller ILE Transducer Arrays, skal du indberette det til fabrikanten (Novocure) og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du er bosiddende.

Rejser med Optune Lua

Batterierne i behandlingssættet indeholder lithium-ion og må ikke medbringes som bagage i passagerfly. De kan medbringes i passagerkabinen. Kontakt venligst DSS, hvis du har spørgsmål vedr. rejserestriktioner.

Bemærk: Optune Lua-udstyret og transducer-arrays vil aktivere metaldetektorer.

14. ORDLISTE

Cancer – unormal celledeling, der spreder sig ukontrolleret

Kemoterapy – medicin, der anvendes til at ødelægge cancerceller

Klinisk forsøg – et forskningsforsøg, der involverer mennesker

Kontraindikationer – omstændigheder, hvor en behandling ikke bør anvendes

EKG – Elektrokardiogram

EN 60601-1 – Harmoniseret standardserie for sikkerhed af medicinsk elektrisk udstyr

Elektrisk feltgenerator (udstyret) – et transportabelt udstyret for levering af TTFields til lunger på patienter med MPM

ILE – Isolerede Lunge transducer-arrays

Lokal – på én del af kroppen

NSCLC – Ikke-småcellet lungecancer

Optune Lua – NovoCure's Tumor Treatment Fields-udstyr for behandling af avanceret NSCLC

Optune Lua behandlingssæt – behandlingssæt bestående af Optune Lua-udstyret (TFT9200); tilslutningskabel (CAD9100); strømforsyning (SPS9200); batteri (IBH9100); lader (ICH9100); ILE Transducer Arrays.

Progression – når cancer vender tilbage efter behandling

Stråleterapi – en behandling der benytter røntgenstråler til at dræbe cancerceller

Steroider – Ved brug på huden, et lægemiddel der reducerer inflammation

Systemisk – gennem hele kroppen

Topisk – på hudens overflade

Transducer-array – klæbende bandager der holder isolerede keramiske skiver der leverer TTFields til brystkassen

TTFields – Tumorbehandlingsfelter: Skiftende elektriske felter, leveret med transducer-arrays til den del af kroppen der har en fast tumor. Felterne er påvist at destruere cancerceller

Tumor – en unormal vækst på væv

15. GÆLDENDE STANDARDER

Optune Lua behandlingssæt elektroniske komponenter og sterile transducer-arrays er i overensstemmelse med de seneste versioner af følgende sikkerhedsstandarder:

- EN 60601-1 Medicinsk elektrisk udstyr — Del 1: Generelle sikkerhedskrav
- EN 60601-1-2 Medicinsk elektrisk udstyr — Del 1-2: Generelle krav til sikkerhed - Sideordnet standard: Elektromagnetisk kompatibilitet — Krav og prøvninger
- EN 60601-1-11 Medicinsk elektrisk udstyr — Del 1-11: Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber — Sideordnet standard: Krav til medicinsk elektrisk udstyr og medicinske elektriske systemer, der benyttes i hjemmeplejen
- EN 60601-1-6 Del 1-6: Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber — Sideordnet standard: Usability
- EN 62366-1 - Anvendelse af usability engineering til medicinsk udstyr
- EN 62304 - Software for medicinsk udstyr. Software levetidsprocesser

16. INDGANGS- OG UDGANGS-SPECIFIKATIONER

Optune Lua behandlingssættet, herunder batteriopladeren, betragtes som klasse II-udstyr i henhold til EN 60601-1.

Driftsform - kontinuerlig. Udstyret er bærbart, når det er batteridrevet, og stationært udstyr, når det er tilsluttet strømforsyningen.

Den anvendte del er klassificeret som BF.

Optune Lua behandlingssættet er ikke egnet til brug i nærheden af brændbare præparater.

17. UDSENDT STRÅLING OG ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Optune Lua-udstyret og den tilhørende batterioplader (ICH9100) og strømforsyning (SPS9200) kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med EMC-oplysningerne nedenfor.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke Optune Lua behandlingssæt og den medfølgende batterioplader.

Optune Lua-udstyret (TFT9200) må kun anvendes med følgende kabler og ekstra dele:

- 1 tilslutningskabel (CAD9100)
- 2 ILE Transducer Arrays (ILE1010; ILE1030; ILE1010W; ILE1030W)
- 3 batteri (IBH9200)
- 4 strømforsyning (SPS9200)
- 5 Batterioplader (ICH9100)
- 6 Uafskærmede AC-netkabler kun til indendørs brug med en maksimal længde på 1,5 m

Anvendelse af tilbehør, dele og kabler, der ikke er specificeret, kan resultere i øgede elektromagnetiske EMISSIONER eller nedsat IMMUNITET af Optune Lua behandlingssættet.

Tabel 1 – Vejledning og FABRIKANTENS erklæring – ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER – for al MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR og MEDICINSKE ELEKTRISKE SYSTEMER

Vejledning og fabrikantserklæring - elektromagnetiske emissioner		
Optune Lua behandlingssættet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Optune Lua skal sørge for, at det anvendes i sådanne omgivelser.		
Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	Optune Lua behandlingssættet bruger kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er udstyrets RF-emissioner meget lave og forårsager sandsynligvis ikke nogen interferens på elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	Optune Lua behandlingssættet er egnet til brug i alle huse, herunder i private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner boligbygninger.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spændingsudsving/flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Overholder	

Vejledning og fabrikanteklæring - elektromagnetiske emissioner		
Opladeren ICH9100 og strømforsyning SPS9200 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af ICH9100 opladeren og SPS9200 strømforsyning bør sikre sig, at det anvendes i sådanne omgivelser.		
Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen bruger kun RF-energi til deres interne funktion. Derfor er deres RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen forstyrrelser i nærheden af elektronisk udstyr.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen er egnet til brug i alle huse, herunder i private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner boligbygninger.
Harmoniske emissioner IEC 61000-	Klasse A	
Spændingsudsving/flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Overholder	

Advarsel: Optune Lua behandlingssæt, ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen bør ikke anvendes ved siden af eller oven på andet udstyr

Tabel 2 – Vejledning og FABRIKANT-erklæring – ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET – for al MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR og MEDICINSKE ELEKTRISKE SYSTEMER

Vejledning og fabrikanterklæring - elektromagnetisk immunitet			
Optune Lua behandlingssættet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Optune Lua behandlingssættet skal sørge for, at det anvendes i sådanne omgivelser.			
Emissionstest	IEC 60601-testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt, ± 2 kV, ± 4 kV, ±8 kV, ± 15 kV luft	±8 kV kontakt, ± 2 kV, ± 4 kV, ±8 kV ± 15 kV luft	Den relative fugtighed skal være mindst 5 %.
Hurtige elektriske transienter/strømstød IEC 61000-4-4	±2 kV for strømforsyningsledninger ±1 kV for indgang/udgang-ledninger	±2 kV for strømforsyningsledninger ±1 kV for indgang/udgang-ledninger 100 kHz gentagelsesfrekvens	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Overspænding IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ±1 kV ledning til ledning ± 0,5 kV, ± 1 kV, ±2 kV ledning til jord	± 0,5 kV, ±1 kV ledning til ledning ± 0,5 kV, ± 1 kV, ±2 kV ledning til jord	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningens indgangsledninger IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklus Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser Enkeltfase: ved 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	0 % UT; 0,5 cyklus Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser Enkeltfase: ved 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Strømfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
BEMÆRK UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.			

Vejledning og fabrikanteklæring - elektromagnetisk immunitet			
Opladeren ICH9100 og strømforsyning SPS9200 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen skal sikre sig, at de anvendes i sådanne omgivelser.			
Emissionstest	IEC 60601-testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	Den relative fugtighed skal være mindst 5 %.
Hurtig elektrisk transient/strømskud IEC 61000-4-4	±2 kV for strømforsyningsledninger ±1 kV for indgang/udgang- ledninger	±2 kV for strømforsyningsledninger ±1 kV for indgang/udgang- ledninger 100 kHz gentagelsesfrekvens	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Overspænding IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV ledning til ledning ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ledning til jord	± 0,5 kV, ± 1 kV ledning til ledning ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ledning til jord	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningens indgangsledninger IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklus Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser Enkeltfase: ved 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	0 % UT; 0,5 cyklus Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser h) Enkeltfase: ved 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	Strømkvaliteten bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Strømfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
BEMÆRK UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet = 120V og 230V			

Tabel 3 - Vejledning og FABRIKANT-ERKLÆRING - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET - for MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR og MEDICINSKE ELEKTRISKE SYSTEMER, der ikke er LIVSSTØTTE


Vejledning og fabrikantserklæring - elektromagnetisk immunitet			
Optune Lua behandlingssættet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af Optune Lua behandlingssættet skal sørge for, at det anvendes i sådanne omgivelser.			
Immunitetstest	IEC 60601-testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Ledet RF IEC 61000-4-6 Stråling RF IEC 61000-4-3	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz (tabel 8.5.1) 10 V/m	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz 10 V/m 80 MHz til 2.7 GHz 80 % AM ved 1 kHz	Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af Optune Lua behandlingssættet, herunder kabler, end den anbefalede afstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand $d = \frac{6}{E} \sqrt{P}$ Hvor P er den maksimale effekt i W, d er den mindste adskillelsesafstand i m, og E er IMMUNITETSTESTNIVEAUET i V/m Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastlagt ved en elektromagnetisk undersøgelse på stedet^a, skal være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde. Der kan forekomme forstyrrelser i nærheden af udstyr, som er mærket med følgende symbol: 
Strålefelter i umiddelbar nærhed Standard IEC 61000-4-39	8A/m 30kHz CW 65A/m 134.2kHz pulsmoduleret 2.1kHz 7,5A/m 13.56MHz pulsmoduleret 50kHz	5 cm afstand	
BEMÆRK Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.			
a. Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radio og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø i forbindelse med faste RF-sendere bør det overvejes at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Optune Lua behandlingssættet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, skal Optune Lua behandlingssættet observeres for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, f.eks. omdirigering eller omplacering af Optune Lua behandlingssættet.			

Vejledning og fabrikanteklæring - elektromagnetisk immunitet			
Opladeren ICH9100 og strømforsyning SPS9200 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen skal sikre sig, at de anvendes i sådanne omgivelser.			
Immunitetstest	IEC 60601-testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Ledet RF IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz	Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen, herunder kabler, end den anbefalede afstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderens frekvens.
Stråling RF IEC 61000-4-3	80 % AM ved 1 kHz (tabel 8.5.1) 10 V/m	80 % AM ved 1 kHz 10 V/m 80 MHz til 2.7 GHz 80 % AM ved 1 kHz	Anbefalet adskillelsesafstand $d = \frac{6}{E} \sqrt{P}$ Hvor P er den maksimale effekt i W, d er den mindste adskillelsesafstand i m, og E er IMMUNITETSTESTNIVEAUET i V/m Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastlagt ved en elektromagnetisk undersøgelse på stedet ^a , skal være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde. Der kan forekomme forstyrrelser i nærheden af udstyr, som er mærket med følgende symbol: 
BEMÆRK Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.			
a. Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radio og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø i forbindelse med faste RF-sendere bør det overvejes at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, skal ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen observeres for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, f.eks. ved at omdirigere eller omplacere ICH9100-opladeren og SPS9200-strømforsyningen.			

Normal drift: Optune Lua behandlingssættet fungerer korrekt, når den blå lysdiode omkring TTFields-knappen er tændt, og der ikke lyder noget notifikationssignal. ICH9100-opladeren fungerer korrekt, når alle lysdioderne er tændte. SPS9200-strømforsyningen fungerer korrekt, når de blå lysdioder omkring TTFields-knappen på Optune Lua-udstyret er tændte, og der ikke lyder noget notifikationssignal.

Tabel 4 - Anbefalede adskillelsesafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR eller MEDICINSKE ELEKTRISKE SYSTEMER - for MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR og MEDICINSKE ELEKTRISKE SYSTEMER, der ikke er LIVSSTØTTE

Nominel maksimal udgangseffekt for senderen W	Adskillelsesafstand i forhold til senderens frekvens m						
	380 –390 MHz	430 –470 MHz	704 –787 MHz	800 –960 MHz	1700 – 1990 MHz	2400 – 2570 MHz	5100 – 5800 MHz
Optune Lua er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor strålingsforstyrrelser fra RF-stråler er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Optune Lua behandlingssættet kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Optune Lua behandlingssættet, som anbefalet nedenfor, i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.							
0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
BEMÆRK: Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.							
For sendere, der er normeret til en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, er den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) kan bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til fabrikanten af senderen.							

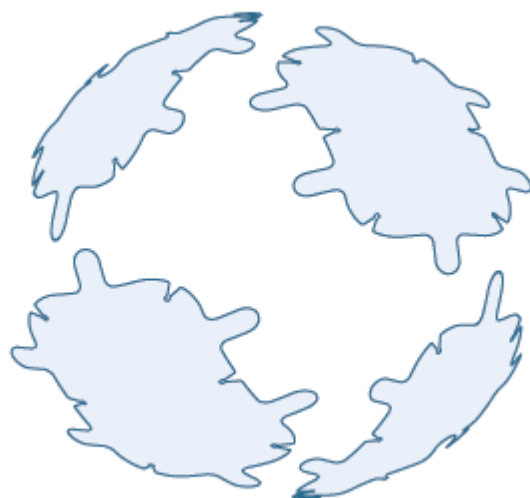

novocure®



Oplysninger om fabrikanten:

Novocure GmbH, Business Village D4, Park 6/Platz 10, 6039 Root,
Switzerland



Importøroplysninger:

Novocure Netherlands B.V., Prins Hendriklaan 26, 1075 BD, Amsterdam,
The Netherlands



EU repræsentant:

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



0197

QSD-EUUM-100 EU(DK) Rev03.0

manuals.novocure.eu